

# Personalisierte Barrierefreiheit

## MobileConnect Kurzanleitung / Information



SENNHEISER

SENNHEISER


# Die MobileConnect App



## App herunterladen

Die MobileConnectApp kann kostenlos aus dem Apple App Store oder Google Play heruntergeladen werden. Die Installation startet automatisch, direkt nach dem Herunterladen.

# Die MobileConnect App

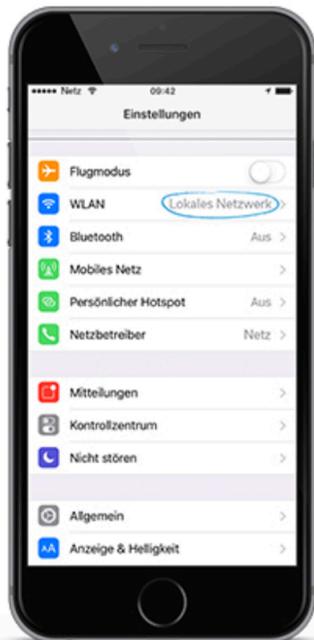

Bitte beachten Sie, dass das lokale WLAN nur direkt in der jeweiligen Spielstätte erreicht werden kann.

## Mit dem WLAN verbinden


Öffnen Sie die Systemeinstellungen auf Ihrem Smartphone und wählen Sie das lokale WLAN aus.

**MobileConnect\_GH**  
**MobileConnect\_KH**



## Starten Sie die App und stellen Sie den Klang ein

Nach dem Sie die App gestartet haben, wählen Sie den gewünschten Kanal. Der „Personal Hearing Assistant“ ermöglicht Ihnen eine intuitive Einstellung des Klangs. Optimieren Sie die Räumlichkeit des Klangs oder die Sprachverständlichkeit, indem Sie einfach mit den Fingern über den Touchscreen streichen.

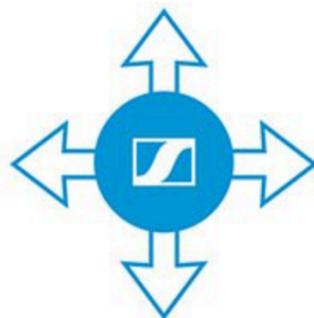

 **Fraunhofer**  
IDMT

## Personal Hearing Assistant

Der Personal Hearing Assistant wurde in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT entwickelt. Er ermöglicht es Ihnen, den Ton ganz einfach an Ihre individuellen Hörbedürfnisse anzupassen. Diese intuitiv zu bedienende Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet Hörunterstützung für Menschen mit Höreinschränkungen und erhöht die Sprachverständlichkeit und Klangqualität für jedermann!



Kompatibel mit:



Hörgeräten



Cochlea Implantaten



Kopfhörern